

Gebruiksaanwijzing - Oorreiniger

38681

NL

Geachte klant,

Dank u voor de aankoop van één van onze kwaliteitsproducten. Houdt u strikt aan de volgende instructies en bewaar deze gebruiksaanwijzing goed.

Productbeschrijving

Deze reiniger wordt gebruikt om overmatig oorsmeer met zorgvuldige zuigkracht uit de gehoorgang naar buiten te werken. Hierdoor kunnen proppen en infecties worden vermeden. Met behulp van de bijgeleverde siliconen opzetstukken is het mogelijk de oren van zowel volwassenen als kinderen hygiënisch schoon en veilig te reinigen. De oorreiniger kan ook worden gebruikt bij gevoelige oren. De reiniger heeft een handig formaat en is gemakkelijk te gebruiken.

Gebruik

1. Open het batterijvak (zie figuur 1) en plaats twee batterijen van het type AA. Let daarbij op de polen (+/-) van de batterijen. Sluit het batterijvak.
2. Plaats één van de vier siliconen opzetstukken op de oorreiniger (zie figuur 2). Wissel het siliconen opzetstuk na elke oorreiniging. Het opzetstuk kan eenvoudig worden gereinigd onder stromend water.
3. Schakel de oorreiniger aan (schakelaar op "ON" zetten) en steek de oorreiniger niet te ver in het oor. Het overmatige oorsmeer wordt door middel van zuigkracht zorgvuldig uit de gehoorgang gewerkt. Schakel de reiniger na gebruik weer uit (schakelaar op "OFF" zetten, zie figuur 3).

Reiniging

4. Draai voor het reinigen de verzameltank in de richting van de pijl (zie figuur 1) en haal vervolgens de tank los.
5. Reinig de verzameltank en de extractor met behulp van de meegeleverde borstel (zie figuur 2).

Waarschuwingen

- Een onjuist of niet beoogd gebruik van het toestel kan leiden tot letsel, materiële schade of beschadiging van de apparatuur.
- Het apparaat mag niet in de handen van kinderen terechtkomen.
 - Spoel het siliconen opzetstuk na elk gebruik onder stromend water.
 - Verwijder de batterijen uit het apparaat als het niet wordt gebruikt.

Technische gegevens

Voedingsspanning: 2 x batterijen 1.5 V, type AA, Gewicht: 99 g

Opgelet: Belangrijke aanwijzingen over de batterijen

- Voor een optimale prestatie van het apparaat, raden wij aan gebruik te maken van alkaline batterijen.
- In geen geval mogen oude en nieuwe batterijen of oplaadbare accu's en gewone wegwerp-batterijen worden gemengd!
- Ook mogen verschillende soorten batterijen (bijv. alkaline- en zinkkoolstof-batterijen) niet met elkaar worden gecombineerd.
- Haal de batterijen uit het apparaat, wanneer u het gedurende langere tijd niet gebruikt. Anders kan lekkend accuwater blijvende schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Aanwijzingen betreffende de recycling van batterijen

Afvoer en recycling van batterijen zijn onderworpen aan wettelijke voorschriften. Afgedankte batterijen zijn chemisch afval en moeten worden ingeleverd in een geschikte verzamelplaats. Lege batterijen mogen niet bij het gewone huisvuil terecht komen. Vervang de batterijen pas nadat deze volledig leeg geraakt zijn. Let bij de omgang met de batterijen op dat u geen kortsluiting veroorzaakt (bijv. door overbruggen van de polen).

Veiligheidsinstructies

Belangrijke aanwijzing: De garantie voor het product vervalt in geval van schade die voortvloeit uit de niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing. Maximex GmbH & CO. KG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

- Gebruik het apparaat alleen met de voorgeschreven spanning.
- Gebruik voor reparaties altijd originele reserveonderdelen om een beschadiging te voorkomen.
- Wij wijzen erop dat storingen tijdens de werking of aansluiting van het apparaat buiten de invloedssfeer van Maximex GmbH & CO. KG liggen. Om deze reden aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
- U dient altijd eerst te controleren of het apparaat geschikt is voor de plaats waar u het wilt gebruiken.

Algemene informatie

1. Elektrische apparaten, verpakkingsmaterialen, enz. buiten het bereik van kinderen houden.
2. Houd bij de afvoer van verpakkingen en afgedankte materialen rekening met de betreffende voorschriften inzake milieubescherming.
3. Geef het apparaat en de gebruiksaanwijzing niet door aan derden.
4. Wijzigingen van het ontwerp en de technische gegevens t.b.v. productverbetering voorbehouden.

Garantie

Wij bieden een garantie van twee jaar voor het apparaat. Gebreken die niet door materiaal- of productiefouten worden veroorzaakt zijn uitgesloten van garantie. Onderdelen die onderhevig zijn aan gewone slijtage zijn uitgesloten van garantie. Omdat Maximex GmbH & CO. KG geen invloed heeft op een correcte montage en een feilloze werking is de garantie alleen geldig voor volledige apparaten, die correct worden gebruikt. Maximex GmbH & CO. KG biedt geen garantie of aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Dit geldt met name wanneer het apparaat wordt gerepareerd of aangepast, wanneer de circuits worden gewijzigd, wanneer gebruik gemaakt wordt van niet originele reserveonderdelen en voor schade als gevolg van een onjuist, nalatig of niet beoogd gebruik.

Aanwijzingen over milieubescherming

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet samen met het normale huishoudelijke afval verwijderd worden, maar moet worden afgegeven op een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking maakt u daarop attent. De werkstoffen zijn volgens hun kenmerking herbruikbaar. Met het hergebruik, de stoffelijke verwerking of andere vormen van recycling van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu. Gelieve bij het gemeentebestuur informatie te vragen over het beoogde verzamelpunt.

