

NATURE'S ANSWER TO BREATHING EASIER

# INHÄLO DSI™

DRY SALT INHALER


100% NATÜRLICH

**BRONCHIAL**

TROCKENSALZ INHALATOR  
FÜR DIE BEHANDLUNG DER  
UNTEREN ATEMWEGE

ENTHÄLT 90 TAGE  
VERWENDBARE SALZKARTUSCHE

NEU

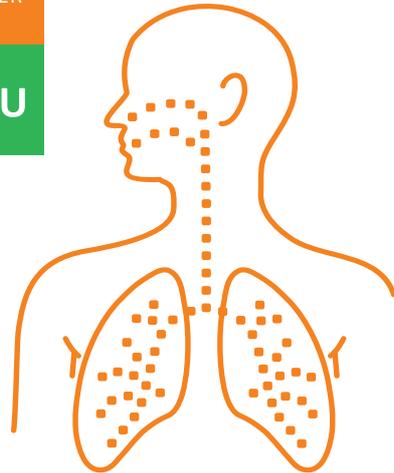

reddot design award  
winner 2012

TIEF, BIS IN BRONCHIEN VORDRINGENDES  
TROCKENSALZ AEROSOL ZUR LINDERUNG  
VON:

- BESCHWERDEN DER UNTEREN  
ATEMWEGE
- ALLERGISCHEN SYMPTOMEN

**NATÜRLICH - SICHER & EFFEKTIV**

ENTHÄLT: GEBRAUCHSFERTIGEN TROCKENSALZ AEROSOL INHALATOR MIT SALZKARTUSCHE  
**5 GRAMM NATÜRLICHES, UNBEHANDELTES STEINSALZ**

**ÜBER DIE SALZ AEROSOL THERAPIE** Bei der Salzlufthherapie wird Salzaerosol (in Luft gelöste Nano-Salzbestandteile) eingeatmet. Die Behandlungsmethode kann bei nahezu allen Arten von Atemwegserkrankungen angewendet werden und ist zu 100% natürlich, sehr gut verträglich und frei von Nebenwirkungen. Das eingeatmete Salzaerosol wirkt antibakteriell und entzündungshemmend, es kann Krankheitserreger auf den Schleimhäuten dezimieren, fördert die Verflüssigung von Schleim und erleichtert damit das Abhusten. Es kann Entzündungen der Bronchien, des Rachens und der Nebenhöhlen lindern und die Heilung beschleunigen. Das Einatmen von Salzaerosol erhöht zusätzlich die Aufnahmefähigkeit von Sauerstoff in der Lunge und wirkt positiv auf das Immunsystem.

### INHALO DSI BRONCHIAL PRODUKTINFORMATION


- Der INHALO DSI BRONCHIAL enthält 5 Gramm natürliches, handselektiertes Steinsalz aus der Salina Pride. Bestandteile in unterschiedlichen Verhältnissen: Natriumchlorid, Magnesium, Kalzium in ihrer natürlich vorkommenden Form.

Anwendungsgebiete: Erkältung mit Husten, Heuschnupfen, Asthma, Bronchitis, COPD, Reizhusten, Raucherhusten, sowie Reizungen der unteren Atemwege im Allgemeinen, Entzündungen und Wunden im Mund und Rachenraum (nach Zahn-OP, Mandel-OP).

### Verwendung des INHALO DSI BRONCHIAL

#### Orale Inhalation (untere Atemwege)

- Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
- Umschließen Sie das orange farbene Mundstück mit den Lippen und atmen Sie tief durch das Gerät ein.
- Nach dem Einatmen, nehmen Sie den INHALO DSI BRONCHIAL vom Mund und atmen durch die Nase wieder aus.

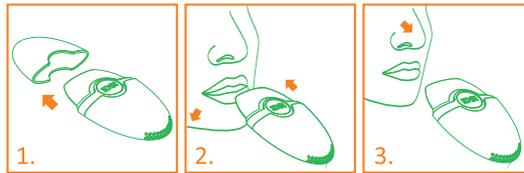

**Hinweis:** Nicht in das Gerät ausatmen, da sich dadurch Feuchtigkeit im Gerät sammelt und die Salzkristalle verkleben können. Nach dem Gebrauch die Schutzkappe wieder aufsetzen. **Empfehlung:** Trinken Sie vor der Anwendung einige Schluck Wasser, um die Mundschleimhaut zu benetzen. Nach der Anwendung nicht unmittelbar trinken, warten Sie bitte 5 Minuten. **Dosierung:** Für eine ideale Wirksamkeit, verwenden Sie den INHALO DSI BRONCHIAL in täglichen Anwendungen von gesamt 15 bis 20 Minuten.

Die Anwendungen können Sie über den Tag, nach Belieben, aufteilen. Wir empfehlen: 4 Sitzungen über den Tag verteilt, mit je 4 bis 5 Minuten. Bei akuten Atemwegs-/Erkältungsbeschwerden, Allergieschüben können Sie die tägliche Anwendung auf bis zu 30 Minuten steigern. Nach der Anwendung werden Sie ggf. für einige Minuten einen leicht salzigen Geschmack im Mund bemerken. Das ist völlig normal und Beleg dafür, das Salzaerosol eingeatmet wurde und Sie den INHALO DSI BRONCHIAL korrekt angewendet haben.

### Warnhinweise

- Verwenden Sie den INHALO DSI BRONCHIAL nicht im Falle einer Lungenentzündung!
- Bei schweren und chronischen Erkrankungen der Atemwege, Herzerkrankungen und/oder Bluthochdruck sowie Schwangerschaft, stimmen Sie eine Verwendung vorher mit Ihrem Arzt oder Apotheker ab!
- Von einer gemeinsamen Nutzung des Gerätes von mehreren Personen wird abgeraten! (Gegeninfektion!)
- Der INHALO DSI BRONCHIAL ist kein Ersatz für eine Medikation und sollte im Falle einer parallelen medikamentösen Therapie, in Abstimmung mit Ihrem Arzt oder Apotheker erfolgen!
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen!
- Nicht schütteln oder fallen lassen!
- ACHTUNG: Enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden können. Erstickungsgefahr! Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren!** Nicht für Kinder unter 2 Jahren geeignet! Bei Kindern unter 5 Jahren wird eine Aufsicht durch Erwachsene bei der Anwendung empfohlen!

### Weitere Informationen

- Nach der ersten Anwendung ist das Gerät 90 Tage bzw. 3 Monate verwendbar.
- Trocken und bei Temperaturen von 15°C bis 30°C lagern.
- Über den QR-Code, unten Mitte, gelangen Sie auf unsere Homepage.
- Die Chargennummer finden Sie unten links.
- Bewahren Sie diese Patienteninformation auf.

**Wartung** Um Verstopfungen durch Salzkristalle zu beseitigen, verwenden Sie bitte eine Nadel oder eine Büroklammer, damit die Luft wieder ungehindert durch das Filtersieb strömen kann. Das Äußere des INHALO DSI BRONCHIAL kann mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt werden. Das Mund- bzw. Nasenstück kann abgenommen und mit warmem Leitungswasser gespült werden. Vor dem Zusammensetzen bitte gründlich trocknen.

### Zulassungs- & Rechteinhaber, sowie Vertrieb durch:

INHALO DSI HUNGARY KFT. (GmbH)  
VIZONTÓ UTCA 4, H-2030 ÉRD, UNGARN  
[www.inhalodsi.eu](http://www.inhalodsi.eu) / [info@inhalodsi.eu](mailto:info@inhalodsi.eu)

Verpackungsinhalt: 1 Stück INHALO DSI Bronchial

Item No 00-200-01

Lot No

**B18PA1S1A01**



**CE** Patent angemeldet  
Hergestellt in Ungarn, EU  
Medizinprodukt Klasse 1

