

Reinigung und Pflege

- Wischen Sie die Einstiegshilfe vor und nach jeder Benutzung trocken.
- Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und ggf. einem haushaltsüblichen Neutralreiniger. Danach trocken wischen.
- Für eine gründliche Reinigung sollten Sie die Einstiegshilfe abbauen, damit Sie auch die Gummipolsterung reinigen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Reinigungsmittel, Säuren oder Laugen.
- Bei Verschmutzungen mit infektiösen Materialien kann die Einstiegshilfe mit üblichen, alkoholischen Flächendesinfektionsmitteln desinfiziert werden.

Wartung

- Prüfen Sie die Einstiegshilfe regelmäßig auf ihren Zustand. Achten Sie dabei auf Verformungen und Risse. In diesem Fall dürfen Sie die Einstiegshilfe nicht mehr benutzen.
- Wenn Sie die Einstiegshilfe öfter ab- und anbauen, achten Sie auch darauf, dass sich die Gummipolsterung in einem einwandfreien Zustand befindet.

Hinweis zur Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die Badewannen-Einstiegshilfe auf eine umweltgerechte Art über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die aktuell geltenden Vorschriften.

Modellnummer 304
Art.-Nr. 06787
L.-Nr. 3809

WEINBERGER GmbH & Co. KG
Bergische Str. 11
42781 HAAN



weinberger®

Badewannen-Einstiegshilfe

Geeignet für Badewannen mit einer Randstärke von 7 cm bis max. 16 cm



- **Hilfreich beim Ein- und Ausstieg, Stehen und Hinsetzen**
- **Schnelle und einfache Montage**
- **Gummierte Auflagefläche für besseren Halt**

- **Passend für handelsübliche Wannenstärken von 7 cm bis max. 16 cm**
- **Stabile Rohrkonstruktion (Ø 25mm)**
- **Maße: 20 x 15 x 50 cm**
- **Gewicht: 3,1 kg**
- **Maximale Belastbarkeit: 65 kg**

Liebe Kundin, lieber Kunde,
hiermit beglückwünschen wir Sie zum Erwerb Ihrer neuen Badewannen-Einstiegshilfe. Diese Einstiegshilfe erleichtert Ihnen das Ein- und Aussteigen in die und aus der Badewanne. Sie sorgt für mehr Sicherheit und Komfort im Badezimmer und lässt sich schnell und einfach an jede handelsübliche Badewanne montieren.

⚠ Sicherheitshinweise

- Die Badewannen-Einstiegshilfe ist für den privaten Gebrauch an handelsüblichen Badewannen mit einer Randstärke von 72 mm bis 165 mm vorgesehen. Für die gewerbliche Nutzung in Kliniken, Altenheimen etc. ist sie nicht geeignet.
- Montieren Sie die Badewannen-Einstiegshilfe ausschließlich an der Längsseite einer geraden Badewanne. An runden oder halbrunden Badewannen darf die Badewannen-Einstiegshilfe nicht verwendet werden.
- Die Badewannen-Einstiegshilfe darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden; die maximale Haltekraft der Einstiegshilfe entspricht 65 kg.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Badewannen-Einstiegshilfe vor und befestigen Sie keine zusätzlichen Elemente.
- Montieren Sie die Badewannen-Einstiegshilfe nicht an anderen Möbelstücken oder Einrichtungsgegenständen (z.B. Tischen, Betten, Duschbecken).

⚠ Hinweise zur sicheren Benutzung

- Wenn sich Seife oder Badeöl an der Einstiegshilfe oder Ihren Händen befindet, besteht die Gefahr des Abrutschens – trocknen Sie ihre Hände und die Einstiegshilfe vorher gut ab.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Einstiegshilfe noch sicher an der Badewanne befestigt ist. Ist die Einstiegshilfe nicht ausreichend fest angeschraubt, besteht die Gefahr, dass sie zur Seite kippt, wenn Sie sich an ihr festhalten. Es besteht Sturzgefahr!
- Benutzen Sie die Einstiegshilfe nicht als Ablagefläche oder Halterung für Bade- oder Duschutensilien (Bürsten, Handtücher etc.). Diese können die Haltekraft verringern und/oder zur Stolperfalle werden.

Montage der Badewannen-Einstiegshilfe

⚠ ACHTUNG

Vor der Montage muss der Bereich der Badewanne, in dem die Einstiegshilfe befestigt werden soll, gereinigt werden. Der Bereich muss sauber, frei von Seifenrückständen und trocken sein, um einen sicheren Halt der Einstiegshilfe zu gewährleisten.

⚠ VORSICHT

Klemmen Sie die Einstiegshilfe nicht zu fest an den Badewannenrand. Die Badewanne könnte beschädigt werden.

⚠ VORSICHT

Die Einstiegshilfe ist schwer. Achten Sie bei der Montage und Demontage darauf, dass Sie mit der Einstiegshilfe nicht gegen Kacheln oder Spiegel stoßen.

- 1) Lösen Sie die Feststellschraube gegen den Uhrzeigersinn soweit, dass Sie die Einstiegshilfe auf den Badewannenrand stecken können. Die Feststellschraube muss nach außen zeigen.
- 2) Drehen Sie die Feststellschraube im Uhrzeigersinn fest an.
- 3) Prüfen Sie den sicheren Sitz der Einstiegshilfe. Sollte die Einstiegshilfe noch beweglich sein, ziehen Sie die Feststellschraube fester an oder positionieren Sie die Einstiegshilfe an einer anderen Stelle am Badewannenrand.

Wenn Sie die Einstiegshilfe wieder abnehmen möchten, z.B. um die Wanne komplett zu reinigen, drehen Sie die Feststellschraube gegen den Uhrzeigersinn und nehmen die Einstiegshilfe nach oben ab.

